## N-NOSE 検体提出手順書


『N-NOSE』は、線虫という生物が 人の尿中からがんの匂いを 高精度に検知することを利用した がんの一次スクリーニング検査です

同封内容の確認

検体提出予約番号とアクセスキーは、A 検体提出袋のシール・B チューブの情報と紐づいています。 ご家族間などで取り違えが起きないよう、十分ご注意ください。

検査キット開封後、必ず同封内容を確認してください。 ※検査キットの有効期限は6ヶ月です。

検体提出手順書 MADIST

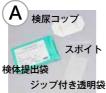









2 検体 (尿) 提出方法の選択~予約完了

インターネットに接続した PC やスマートフォンから、検体提出の予約をしてください。

1. マイページにログインして、「尿検体の提出予約」から予約をしてください。 ※マイページは受検者様ごとに必要になるため、登録がお済みでない方は新規登録を行った後に、 予約をしてください。

マイページログイン・新規登録:https://www.n-nose.com/mypage/login/

マイページには こちらの QR コードからも アクセスできます

2. 本紙右上に記載されている、【検体提出予約番号】と【アクセスキー】を入力して、 予約に進んでください。

情報の入力

・提出方法を選択(N-NOSEステーションへ持ち込むまたは自宅に取りに来てもらう\*)します。

持ち込みを行うすべての方がお読みください

提出場所と提出期間をお 選びください。

確認

申込内容を確認して

予約を確定するをクリックします。

3 完了

ご予約完了です。

集荷料金の支払いを行う代表者の方がお読みください

- \*集荷料金: 2,200 円 (稅込)/北海道·沖縄: 2,750 円 (稅込) は、クレジットカード払いとなります。 \*一度の集荷で5名分まで提出可能

集荷エリアを指定して 選択をクリックします。

回収日時を選択します。

個人情報を入力して 確認に進むをクリックします。

2 確認

> クレジットカード情報を入力して 予約を確定するをクリックします。

3 完了

ご予約完了です。

※複数の検体を提出される方は、最終画 面に記載された【集荷予約番号】を、メー ル等でご一緒に集荷される方にお知らせ ください。

検体提出の準備にお進みください (引き続き、右面をご覧ください) 代表者以外の方は こちらをお読みください。

マイページにログインします。 (登録がお済みでない方は新規登録)

「尿検体の提出予約」を選択し、 予約をしてください。

本紙右上に記載されている、 【検体提出予約番号】と【アク セスキー】を入力して、予約に 進んでください。

「代表者と一緒に検体を集荷し てもらう」を選んでください。

代表者から通知された【集荷 予約番号】を入力してください。

入力されている個人情報をご 確認のうえ、予約を確定してく ださい。

検体提出の準備にお進みください (引き続き、裏面をご覧ください)